


## (N) Monteringsanvisning

Bekkesele Neopren - Art. nr. 21011

## (GB) Mounting description 安装说明


Abduction belt Neoprene - Item no. 21011

橡胶分腿垫,零件号: 21011

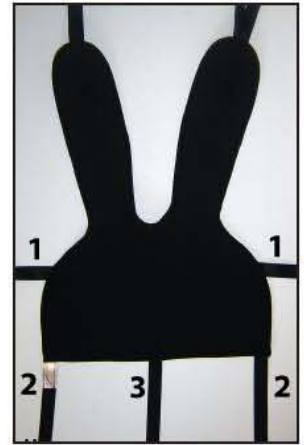

1. (N) Trekk remmen gjennom hoftebeltefestet.  
(GB) Tre remmen tilbake gjennom belteklemmen.

- (GB) Pull the strap through the hole in the hip belt bracket.  
(GB) Thread the strap back through the belt clamp.  
将扣带穿入臀部带扣后,反回穿入所配带夹里

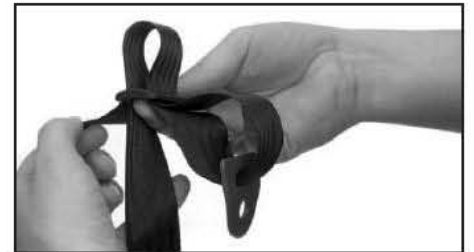

2. (N) Tre på en belteklemme, og trekk remmen deretter gjennom plastklemmen. Tre remmen tilbake gjennom belteklemmen.

- (GB) Pull on a belt clamp, then pull the strap through the hole in the enclosed plastic clip. Thread the strap back through the belt clamp.

3. (GB) 装入带夹, 将带子穿过所附塑料带夹孔里, 再将带子反穿回带夹里。

- (N) Fest den ene enden på justerremmen i plastlåsen.



4. (GB) Fix one end of the adjustment strap in the plastic clip.  
(N) 将塑料夹上的调节带固定好。

- (N) 1. Fest stropp 2 og hoftebeltebraketten i det bakerste hullet i rygghengsle-braketten med den vedlagte skrue og mutter. Bruk to 13mm fastnøkler.

- (GB) 2. Fest stropp 1 på hver side til topprammen med en belteklemme.

5. (N) 1. Fix the hip belt bracket and strap 2 in the rearmost hole of the back rest hinge using the enclosed screws and nuts. Use two 13mm open-end spanners.  
(GB) 用两把 13MM 开口(合)扳手, 装好臀部带扣并用所配螺丝、螺母将两条带子固定在靠背支架管最后一个孔上。

- (N) 2. Attach strap 1 on each side to the top frame using a belt clamp.

6. (GB) 用带夹将两条带子分别系在轮椅左右边框上部

- (N) Fest stropp 3 med en belteklemme til tverrstaget under seteplaten.

Strap 3 is attached to the cross bar under the seat plate using a belt clamp.

带子 3 用带扣固定在座椅板下的横杆上

- (GB) Før sammen plastlåsene, og dra i ringen for å stramme.

Put the plastic locks together and pull the rings to tighten.使用时,将两边塑料扣锁好系紧



# ALU\_REHAB™



NB! Fest stropp 3 **under** seteplaten mot fronten, og ikke bak på ryggstag.  
NB! Attach strap 3 to the cross bar **under** the seat plate towards the front,  
and not on the backrest bar at the rear of the seat plate.

注意：第三条带应装在坐垫板下向前的那一根横杆上而不应装在坐板后那根靠背横杆上！