

# Monteringsanvisning Hoftebelte

## Mounting Description Hip belt

### 臀部坐姿矫正带安装说明

#### NORSK

Trekk beltet gjennom hoftebeltefestet som ligger vedlagt (Bilde 1).  
 Tre beltet tilbake gjennom belteklemmen (Bilde 2).  
 Fest hoftebeltet i det bakerste hullet i rygghengsle-braketten med den vedlagte skrue og mutter (Bilde 3). Bruk to 13mm fastnøkler.  
 Hoftebeltebraketten bør stå i 45 graders vinkel (Bilde 4).



#### ENGLISH

Pull the belt through the hole in the hip belt bracket (Picture 1).

将臀部带扣穿入带子中(图 1)

Thread the belt back through the enclosed belt clamp (Picture 2).

将带子反穿入所配带) 夹中(图 2)

Fix the hip belt bracket in the bacmost hole of the backrest hinge using the enclosed screws and nuts (Picture 3). Use two 13mm open-end spanners.

The hip belt bracket should be mounted in a 45 degrees angle.

用 2 把 13MM 开口扳手和附带的螺丝和螺帽，将臀部带扣固定在靠背支架铰接件最后一个孔上。

臀部带扣应装成 45 度角。